



Seringa/Medidor de Dilatação Viper[®]

***Instruções de Uso.
Leia atentamente antes de usar.***

Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda ou o pedido deste dispositivo,
que somente pode ser realizado por um médico.

Diversatek Healthcare

102 E. Keefe Ave.
Milwaukee, WI 53212 EUA
T 800.558.6408 | 414.265.7620

sales@diversatekhc.com

DiversatekHealthcare.com

Seringa/Medidor de Dilatação Diversatek Healthcare Viper®
Instruções de Uso.
*Leia atentamente antes de usar.***USO PRETENDIDO**

A Seringa/Medidor de Dilatação Viper® de uso único tem sua aplicação realizada em combinação com uma alça de enchimento (não fornecida nesta embalagem) para encher e esvaziar os dilatadores de balão endoscópico, ao mesmo tempo em que monitora as pressões do dilatador de balão.

Número da peça

1204-01

Descrição

Seringa/Medidor de Dilatação Viper®, Não estéril

QUEM USARÁ ESSE PRODUTO

O uso deste dispositivo é restrito a um profissional de saúde treinado.

CONTRAINDICAÇÕES

As contraindicações incluem as descritas especificamente para dilatação.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Seringa para uso em um único paciente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou levar à falha do dispositivo o qual, por sua vez, pode resultar em lesão, doenças ou óbito do paciente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização também podem aumentar o risco de contaminação do dispositivo e/ou causar infecção ou infecção cruzada do paciente, incluindo, entre outros, a transmissão de doença(s) infecciosa(s) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode levar a lesões, doenças ou óbito do paciente.

Não utilize este dispositivo para qualquer finalidade diferente do uso pretendido.

Armazene em local seco e protegido de temperaturas extremas.

INSTRUÇÕES DE USO

Monte e utilize a Seringa/Medidor de Dilatação Viper de acordo com as instruções do fabricante da alça de enchimento.

Este dispositivo é compatível com alças de enchimento para seringas de 60 cc.

DESCARTE DO PRODUTO

Após o uso, este produto pode representar um risco biológico potencial. Descarte o produto e a embalagem do produto de acordo com a prática médica aceita e as leis e os regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS



Fabricante



Data de Validade (AAAA-MM-DD)



Número do lote/Código do lote



Número da peça



Não estéril



Não utilize se a embalagem estiver danificada



Não reutilize



Não reesterilize



Fabricado sem látex de borracha natural



Consulte as instruções de uso

Viper® é uma marca comercial registrada da Diversatek Healthcare.
Diversatek™ Healthcare é uma marca comercial da Diversatek, Inc.

Detentor da notificação/Importador: GFE do Brasil LTDA
Rua Buarque de Macedo, 1310
Campinas-SP
Resp. Técnico: Cláudio Seo CRF: 52.207
RMS: 10334789011